

TOUTE LA PUISSANCE DE LA PHOTOBIO-MODULATION



VISAGE & CORPS

RAJEUNISSEMENT

ACNÉ

CICATRISATION

VERGETURES

ET PLUS ENCORE...

TOUS LES PHOTOTYPES

TOUTE L'ANNÉE

1 TECHNOLOGIE POUR TRAITER EN SURFACE ET EN PROFONDEUR
4 LONGUEURS D'ONDE MONOCHROMATIQUES



[LA PHOTOBIO MODULATION]

La photobiomodulation a pour but de promouvoir la stimulation et la régulation des échanges biologiques cellulaires.

C'est un processus naturel qui s'appuie sur l'absorption sélective de longueurs d'ondes de basse énergie par des chromophores* ou photorécepteurs cellulaires afin d'obtenir une réaction photobiologique.

La longueur d'onde ainsi que son intensité déterminent la façon dont la lumière est absorbée par les molécules des différents tissus.

Les longueurs d'ondes spécifiques déclenchent une réponse cellulaire suite à l'absorption de la lumière.

*photorécepteurs situés dans la peau (exemple : la mélanine, l'hémoglobine, l'eau, les protéines).



L'énergie lumineuse va activer la réaction cellulaire et stimuler la production de protéines de collagène et d'élastine par les fibroblastes de la peau.

Le Soli-Lite (logo) combine une action ciblée sur toutes les structures de la peau de façon sécuritaire et non invasive, SELON LA LONGUEUR D'ONDE SÉLECTIONNÉE.:

- l'épiderme,
- la circulation sanguine et lymphatique,
- le derme
- les tissus sous-cutanés profonds (les muscles)



Le Soli-Lite (logo) offre des traitements qui permettent de traiter de nombreux problèmes de peau, pour le visage et le corps:

- Rides, ridules et pattes d'oies,
- Peaux vieillissantes
- Acné légère à modérée
- Marques dues à l'acné
- Cicatrices (anciennes ou nouvelles)
- Vergetures
- Stimulation de la capacité naturelle du corps à guérir.

Prouvé Scientifiquement

Études médicales et scientifiques sur la lumière à citer (Alice) voir ppt qu'elle m'a envoyé

Appareil médical de classe II homologué par Santé Canada. Conçu et fabriqué au Canada, en conformité avec les normes médicales les plus strictes.



[DES RÉSULTATS NATURELS & DURABLES]



AMÉLIORATION

DE LA STRUCTURE DES RIDES ET RIDULES
DU GALBE DES CONTOURS DU VISAGE
DE LA TAILLE DES PORES
DE LA TEXTURE DE LA PEAU
DES ZONES HYPERPIGMENTÉES
DE L'ÉCLAT DU TEINT
DE LA STABILITÉ DE L'ACNÉ ROSACÉE

**DIMINUTION &
NEUTRALISATION** DE L'ACNÉ
POUR 100% DES CAS TRAITÉS

RESPECTE LA PHYSIOLOGIE & LA BIOLOGIE DE LA PEAU
SANS RISQUE NI DOULEUR
SANS EFFET SECONDAIRE OU THERMIQUE

UNE UTILISATION SIMPLE

55 programmes préparamétrés + mode manuel

Un menu permet de sélectionner le programme désiré parmi un choix de soins préprogrammés. Il est également possible de faire un soin sur mesure en augmentant ou en diminuant l'intensité. La puissance du flux et le temps de traitement seront ajustés automatiquement.

Facilité d'utilisation grâce à l'écran tactile convivial;

Traitement des surfaces étendues ou étroites de peau grâce au panneau ergonomique divisé en 5 sections amovibles

Soin efficace pour une multitude d'imperfections de la peau (vieillesse, cicatrices post-opératoires, inflammations);

Soin qui se combine facilement à d'autres traitements (facial ou autre).



1 SOIN
15 MIN EN MOYENNE



RÉSULTAT
APRÈS 3-4 SOINS



FRÉQUENCE
1 À 2 SOINS PAR SEMAINE



ENTRETIEN
1 SOIN PAR MOIS




EFFETS DURABLES
CURE DE 6, 8 OU 12 SOINS

[850 LEDs DE NOUVELLE GÉNÉRATION]

Le seul appareil sur le marché permettant d'avoir une action ciblée sur toutes les structures de la peau tant pour le visage que pour le corps :

- Épiderme,
- Micro-circulation sanguine et lymphatique,
- Derme,
- Tissus sous-cutanés profonds (muscles).

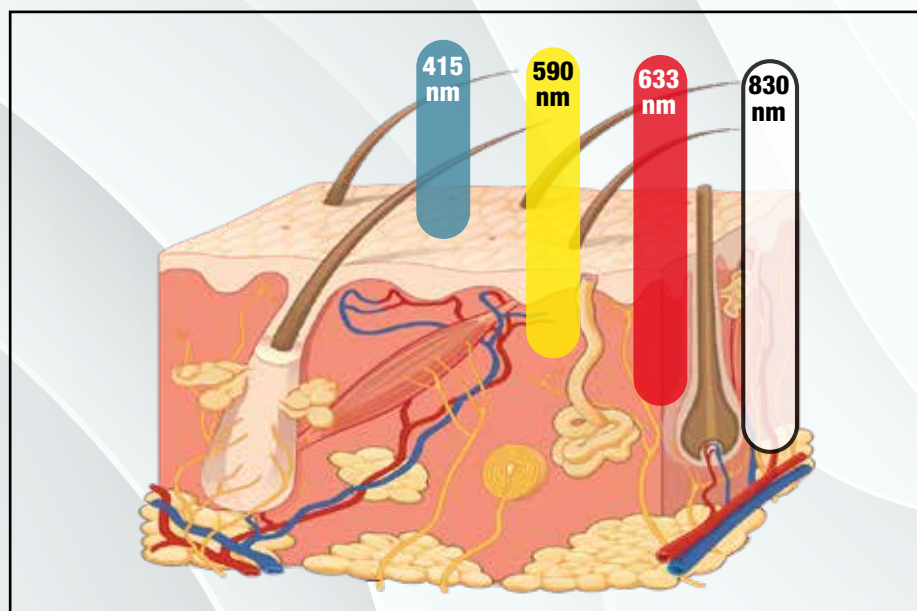

L'efficacité unique du Soli-Lite repose sur l'utilisation des LED de la toute nouvelle génération avec lentille intégrée à faisceau étroit de 40 à 45 degrés pour contrôler l'angle d'émission du flux. La puissance du flux, émis à haute intensité et bien ciblé, accroît l'efficacité du soin.

Le système de refroidissement exclusif du Soli-Lite empêche les fluctuations de la longueur d'onde, ce qui assure des paramètres optimaux pour toute la durée du soin.

Un bras mobile qui soutient le panneau, capable de s'ajuster à toutes les tables de soin et toutes les morphologies.

Un panneau lumineux articulé qui pivote pour encadrer parfaitement des surfaces étroites ou arrondies, ou encore pour cibler des surfaces étendues de peau. L'articulation du panneau permet d'obtenir une intensité uniforme sur chaque point à traiter, grâce au maillage des panneaux LED.

[4 LONGUEURS D'ONDE MONOCHROMATIQUE]

1 BLEU DE LONGUEUR D'ONDE 415 NM

La lumière bleue active les porphyrines endogènes de la bactérie *P. acnes*, déclenchant une réaction photodynamique pour détruire la bactérie¹. Cette longueur d'onde est utilisée pour freiner et réduire la propagation de l'acné et améliorer les cas d'acné légers à modérés.

2 JAUNE DE L'ONGUEUR D'ONDE 590 NM

La lumière jaune est combinée à l'infrarouge lors d'un soin. Elle sert à améliorer la micro-circulation sanguine et lymphatique.

3 ROUGE DE L'ONGUEUR D'ONDE 633 NM

Elle est absorbée par toutes les couches de la peau, y compris le derme. L'exposition à cette longueur d'onde favorise la synthèse des fibres de collagène dans la peau², stimulant les processus de réparation et de cicatrisation de la peau.

4 INFRAROUGE DE L'ONGUEUR D'ONDE 830 NM

Ce flux est absorbé par la membrane cellulaire. Il stimule l'activité fibroblastique, accélérant ainsi les processus de défense et de réparation de l'organisme.

¹ 830 nm light-emitting diode low level light therapy (LED-LLLT) enhances wound healing: a preliminary study, Pok Kee Min, Boncheol Leo Goo Laser Therapy 22.1: 43-49

² Combined 633-nm and 830-nm LED treatment of photoaging skin Amin, Snehali; Goldberg, David J.; Kellett, Norma; Phelps, Robert; Reilly, Laurence A.; Russell, Bruce A Journal of Drugs in Dermatology, 9/1/2006.

L'interaction des longueurs d'onde bleue et rouge permet de traiter la bactérie responsable de l'acné en freinant sa propagation. La texture de la peau s'améliore et devient plus uniforme.

[415 NM] STIMULE LES PROCESSUS ANTIBACTÉRIENS ET ANTI INFLAMMATOIRES

- Neutralise la bactérie de l'acné,
- Diminue l'activité des glandes sébacées,
- Limite les éruptions de papules et pustules,
- Traite les cicatrices d'acné.



[590 NM] CIBLE LA CIRCULATION SANGUINE ET LYMPHATIQUE POUR APAISER LA PEAU

- Atténue les érythèmes,
- Active la micro-circulation sanguine et lymphatique pour relancer le transport d'oxygène et la nutrition des cellules pour clarifier le teint,
- Draine les déchets métaboliques,
- Agit sur l'élimination des oedèmes et hématomes.



[633 NM] CIBLE LE DERME, POUR FAVORISER LE PROCESSUS NATUREL DE RÉGÉNÉRATION

- Régénère les fibroblastes,
- Stimule la production de nouveau collagène,
- Augmente la production d'ATP (énergie cellulaire)
- Inhibe les rougeurs sous cutanées,
- Agit sur la régénération cellulaire en réparant les cellules endommagées,
- Traite les cicatrices et les vergetures.
- Accélère le processus de guérison de la peau
- Réduit l'oedème et l'inflammation, ce qui ouvre la porte à de nombreuses applications en esthétique comme les soins anti-âge et l'atténuation des cicatrices.



[830 NM] CIBLE LES TISSUS PROFONDS POUR FAVORISER LES MÉCANISMES DE RÉPARATION

- Accélère le processus de guérison de la peau (cicatrisation)
- Diminue l'oedème et l'inflammation
- Réparation tissulaire
- Augmente la circulation sanguine et lymphatique
- Augmente la perméabilité de la membrane cellulaire.



La combinaison 830nm + 590nm est très utilisée pour traiter de multiples conditions de cicatrisation, en soulageant la douleur et l'inflammation. La principale intention est de réactiver les fonctions des cellules.

[RÉSULTATS DE NOS ÉTUDES]

[LISSAGE DES RIDES]

La performance du système a été mesurée dans le cadre d'essais en clinique (ÉTUDES DE CAS effectuées dans les cabines de Silhouet-Tone).

ÉTUDES DE CAS

Les patients sont âgés de 23 à 60 ans, plusieurs classifications de Glogau et phototypes représentés.

- La diversité dans le choix des patients favorise une maîtrise totale du Soli Lite et permet ainsi de vous proposer un maximum de protocoles de soins adaptés à vos besoins.

- L'étude a été menée dans le but de démontrer l'efficacité de notre appareil Soli Lite utilisant les LEDs, suivant les allégations citées ci après : rajeunissement cutané, acné, soulagement de la douleur physique.

- Le Soli Lite a été utilisé seul sans autre combinaison de technologie.

- Cette démarche nous permet de souligner l'impact et le pouvoir de la lumière sur la peau.

- La lumière rouge a 633nm, lumière bleue a 415nm et infra rouge a 830 nm, ont été choisis pour réaliser les tests cliniques présentés plus bas.

Avant



Après 10 traitements



[REDRESSEMENT DES PAUPIÈRES]

Avant



Après 10 traitements



[AMÉLIORATION DE L'ACNÉ]

Avant



Après 10 traitements



[TESTS CLINIQUES]

Les résultats sur l'amélioration visible de la peau apparaissent dès 2-3 traitements au minimum, selon le vieillissement cutané de départ propre à chaque individu (Classification de Glogau).



DÉCLARATION

S.T Medic confirme que ses études de cas ont été menées conformément à un ensemble de directives et de protocoles rigoureux. Aucune donnée n'a été modifiée ou transformée en vue de favoriser l'atteinte de nos objectifs.

SOLUTION CLÉ EN MAIN

DÉMONSTRATION

Nous vous proposons de ressentir l'efficacité du Soli-Lite dans notre centre de formation. Prenez rendez-vous !

FORMATION

Pour l'achat d'un appareil Soli-Lite (logo) nous vous offrons la journée de formation. (Théorie + Pratique)

SOUTIEN COMMERCIAL ET MARKETING

Nous vous fournissons tout le nécessaire pour démarrer sereinement avec votre appareil :

- Une proposition de formules de ventes avec protocoles de soins et tarifs,
- Un business plan avec amortissement et rentabilité,
- Les brochures pour vos clientes ainsi que des fiches de suivi clientes,
- Des visuels pour vos réseaux sociaux,
- Une PLV pour votre institut,
- Une journée de lancement «Découverte» à vos côtés pour recruter vos premières clientes.



Spécifications LED :

Jaune : 18 x 1 W (590nm)
Infrarouge : 80 x 3 W (830nm)
Rouge : 72 x 1 W (633nm)
Bleu : 32 x 3 W (415nm)

Fabriqueur nord-américain depuis 1965.

Nous offrons des équipements de technologies avancées et du mobilier spécialisé pour les professionnels de l'esthétique et de la santé les plus réputés dans le monde.

Conçus et fabriqués au Canada, en conformité avec les normes internationales les plus strictes.

Spécifications techniques de l'appareil:

Diamètre de la base : 60 cm (26 po)
Hauteur du pôle à partir du sol : 167 cm (66 po)
Longueur du bras étendu (avec tête et base) : 122 cm (48 po)
Dimension de la console : 43,8x31,8cm (17 1/4x 12 1/2 po)
Poids total (lampe sur base) : 60 kg (xx lb)
Puissance : 120/230 V – 60/50 Hz -0,88-0,44 A

*Silhouet-Tone Corporation Canada



SILHOUET-TONE CORPORATION

2185, Michelin
Laval, Québec H7L 5B8 Canada
Tel.: 450 687-9456, 1 866 340-9456
Fax: 450 687-5155
info@silhouettone.com

SILHOUET-TONE (U.S.A.)

1623 NW 84th Avenue
Miami, Florida 33126 U.S.A.
Tel.: 1 800 552-0418
stusa@silhouettone.com

SILHOUET-TONE (EUROPE) S.A.

Route de Suisse 9, CH-1295-Mies, Suisse
Tel.: +41 22 775-15 60
Fax: +41 22 775-15 67
ste@silhouet-tone.com

SILHOUET-TONE FRANCE Sarl

14, avenue du Dr Palluel
74160 St-Julien-en-Genevois, France
Tel.: +33 4 50 49 45 32
Fax: +41 22 775-15 67
stf@silhouet-tone.com

Informations & Démonstrations

sts@silhouet-tone.com
Tél: +41 (0)22 775 15 60

S.T MEDIC
Une division de Silhouet-Tone Corporation

