

R M D 2.0

[RAJEUNIR SANS CHIRURGIE]

EFFET LIFTING COMPLET VISAGE & COU



5 À 9 ANS

DE RAJEUNISSEMENT DE LA PEAU

151%

DE DIMINUTION DES RIDES

119%

D'AMÉLIORATION DU RESSERREMENT
DES PORES

LA SYNERGIE UNIQUE DE 5 TECHNOLOGIES SYNCHRONISÉES
DANS 1 SEULE ÉLECTRODE



[L'ALTERNATIVE AU LIFTING CHIRURGICAL]



Le nouveau **RMD 2.0** représente le système de rajeunissement le plus évolué grâce à des technologies non invasives et non chirurgicales.

Il est conçu pour offrir les résultats de remodelage structural de la peau et des muscles peauciers les plus remarquables de l'industrie de l'esthétique médicale.

Cet appareil combine 4 technologies d'électrothérapies reconnues en plus des ultrasons, dont l'utilisation en synergie permet d'obtenir des résultats exceptionnels de façon optimale, sécuritaire et efficace.


Le **RMD 2.0** est le seul appareil sur le marché permettant d'obtenir une action ciblée sur toutes les structures du visage et du cou : l'épiderme, le derme et les muscles peauciers.

Il offre des soins performants qui permettent de :

- Lisser et combler les rides et les ridules,
- Redensifier les muscles affaissés,
- Raffermer la peau,
- Resserer les pores,
- Repulper, apporter éclat et tonification à l'épiderme.



DES RÉSULTATS REMARQUABLES & DURABLES

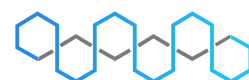

5 À 9 ANS

DE RAJEUNISSEMENT DE LA PEAU

225%

D'AMÉLIORATION DE LA TEXTURE DE LA PEAU

151%

DE DIMINUTION DES RIDES

119%

D'AMÉLIORATION DU RESSERREMENT DES PORES

95%

DES CONSOMMATRICES SATISFAITES

**SANS RISQUE NI DOULEUR
SANS INJECTION NI AIGUILLE
SANS ÉVICTION SOCIALE**

Prouvé Scientifiquement
Appareil cliniquement prouvé par le Laboratoire d'Innovation
et d'Analyse de la Bioperformance (LIAB) et le Département
Ingénierie Mécanique/biomédicale de l'Université
Polytechnique Montréal.



Appareil médical de classe II homologué par le ministère de la
santé du gouvernement du Canada.
Cliniquement testé avec des résultats concluants au terme de 2
à 8 soins.
Conçu et fabriqué au Canada, en conformité avec les normes
médicales les plus strictes.



1 SOIN
25 MIN



RÉSULTAT
LIFTING IMMÉDIAT



FRÉQUENCE
1 À 2 SOINS PAR SEMAINE



ENTRETIEN
1 SOIN PAR MOIS



EFFETS DURABLES
CURE DE 6, 8 OU 10 SOINS



COUP D'ÉCLAT
1 SOIN

[DES TECHNOLOGIES INNOVANTES]

Le seul appareil sur le marché permettant d'avoir une action ciblée sur toutes les structures du visage et du cou :


- Épiderme,
- Derme,
- Muscles peauciers.

Le système **RMD 2.0** est une synergie unique de 5 technologies, dans un seul appareil avec une seule tête de traitement qui donnent des résultats immédiats.

Ces 5 technologies synchronisées sont diffusées d'une manière cyclique, avec une programmation intégrée propre à S.T MEDIC.



[5 TECHNOLOGIES COMBINÉES]

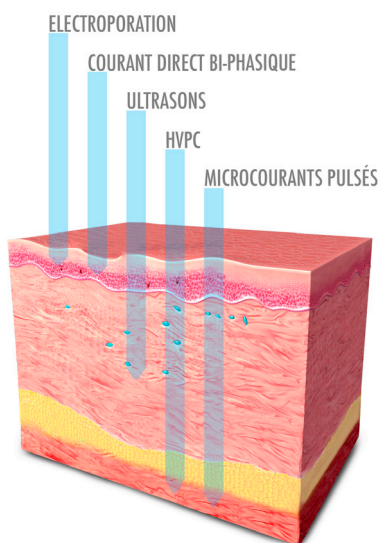

1 ÉLECTROPORATION

Les courants monophasiques triangulaires à pulsations courtes produisant 70 V augmentent la perméabilité de la membrane cellulaire (phénomène d'électroporation) et stimulent la réparation des tissus.

2 COURANT DIRECT BI-PHASIQUE

Le courant direct bi-phasique produit 250 $\mu\text{A}/\text{cm}^2$ à son intensité maximale. Il contribue à la pénétration des molécules.

3 ULTRASONS À DIFFUSION CONSTANTE

Les ultrasons à 3MHz stimulent la synthèse du collagène et facilitent le passage des molécules du concentré gélifié RMD 2.0 à travers les couches cutanées de l'épiderme.

4 HVPC

Les courants pulsés à double pic produisant 135 V procurent une stimulation neuromusculaire profonde pour réparer et tonifier les fibres musculaires.

5 MICROCURRENTS PULSÉS

Les courants à pulsations biphasiques, produisant 120 $\mu\text{A}/\text{cm}$ à leur intensité maximale, augmentent la réceptivité des muscles aux stimulinerveux et maintiennent l'homéostasie cellulaire.

[1 ÉLECTRODE DE TRAITEMENT SYNCHRONISÉE]

Le **RMD 2.0** fonctionne avec une électrode de traitement unique qui transmet l'énergie de l'épiderme jusqu'aux tissus musculaires.

Cette électrode dotée d'un micro-processeur est ergonomique, facile d'utilisation, efficace et sécuritaire.

Elle permet de traiter toutes les parties du visage et du cou en 3 zones paramétrées.

[1 CONCENTRÉ GÉLIFIÉ ANTI-ÂGE]

Le concentré gélifié anti-âge **SMOOTH SKIN** est spécialement conçu pour amplifier et magnifier les actions du **RMD 2.0**.

Il est composé d'ingrédients anti-âge d'excellence tels que les peptides, les vitamines B12, les sels minéraux, les oligo-saccharides et la niacinamide, pour faire perdurer les effets de l'appareil.

Fabriqué en Suisse selon les normes les plus strictes de l'industrie cosmétique.

[1 PROGRAMME DE TRAITEMENT]

Le programme est facile d'utilisation avec un temps de passage et une intensité définis par zone, qui convient à tout niveau de pratique esthétique.

Les paramètres sont ajustables selon les besoins et le niveau de tolérance individuel.

BÉNÉFICES PHYSIOLOGIQUES PAR TECHNOLOGIE

Épiderme 1 + 2

- Hydratation, nutrition et réparation de l'épiderme grâce à la pénétration des actifs du concentré gélifié anti-âge **SMOOTH SKIN**.
- Texture de la peau améliorée par stimulation de l'énergie cellulaire et de la micro-circulation sanguine et lymphatique.
- Maintient l'homéostasie des cellules cutanées.

Derme 3

- Regonflement des rides et des ridules.
- Lissage et détente des traits par stimulation de la production des fibres de collagène par l'activité fibroblastique.

Muscles 4 + 5

- Effet liftant.
- Raffermissement des muscles affaiblis et restauration du tonus musculaire.



[RÉSULTATS DE NOS ÉTUDES]

[AFFAISSEMENT DES PAUPIÈRES]

La performance du système a été mesurée dans le cadre d'essais en clinique (ÉTUDES DE CAS effectuées dans les cabines de Silhouet-Tone) et d'ÉTUDES SCIENTIFIQUES en laboratoire (tests in vitro effectués dans les laboratoires de LIAB et de l'École Polytechnique), supervisés par la Directrice Scientifique de S.T Medic, la Dre Mihaela Ungur.



ÉTUDES DE CAS

Au terme de l'étude, tous les participants ont démontré une amélioration de la texture de la peau allant de 35% à 225%.


50% des sujets ont affiché un rajeunissement apparent de la peau de 4 ans et plus.

L'amélioration du resserrement des pores a dépassé une moyenne de 119% pour les participants à l'étude.


Une diminution importante des rides en moyenne de 151% fut constatée chez les participants.

La moyenne de rajeunissement apparent fut évaluée à plus de 5 ans et a même atteint dans certains cas 9 ans.

[TAILLE DES PORES]

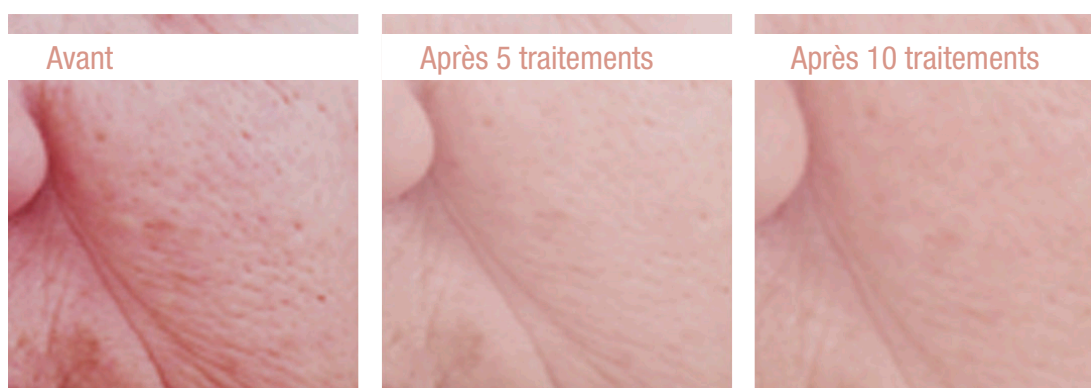


[PLI D'AMERTUME]

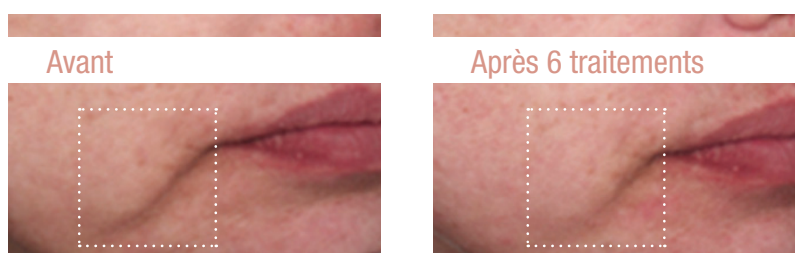

ÉTUDES SCIENTIFIQUES

Les résultats sur l'amélioration visible de la peau apparaissent dès 2-3 traitements au minimum, selon le vieillissement cutané de départ propre à chaque individu (Classification de Glogau).

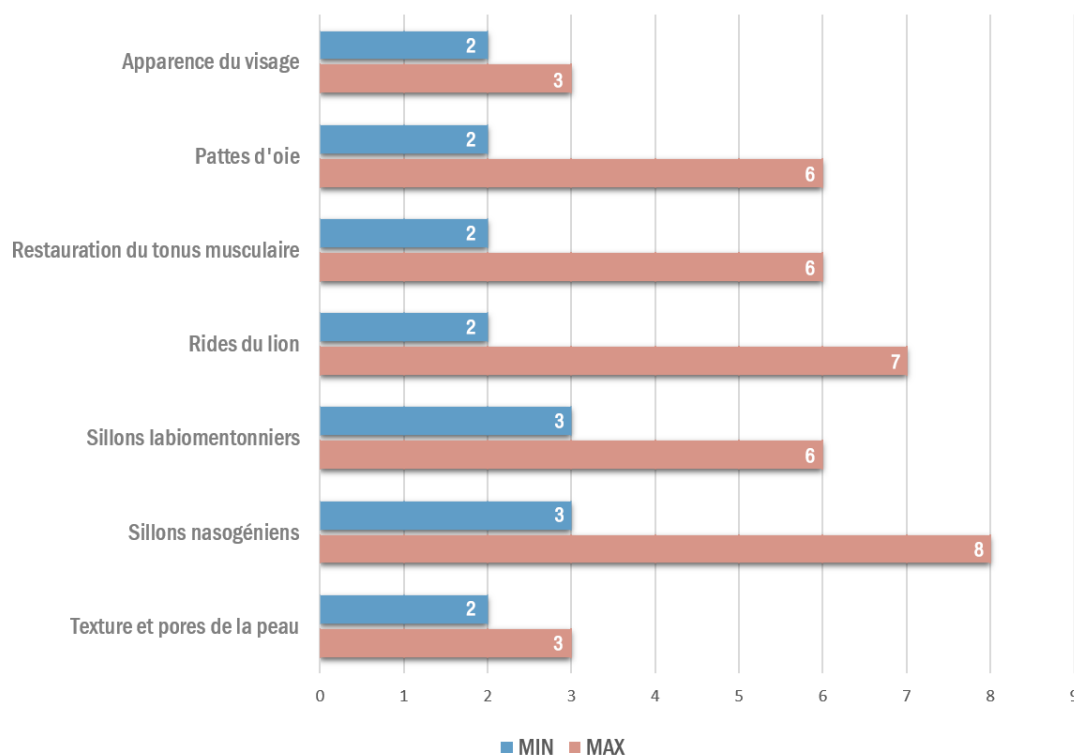

DÉCLARATION

S.T Medic confirme que ses études de cas ont été menées conformément à un ensemble de directives et de protocoles rigoureux. Aucune donnée n'a été modifiée ou transformée en vue de favoriser l'atteinte de nos objectifs.

ÉTUDES SCIENTIFIQUES

Les effets des micro-courants impulsés et de la stimulation ultrason sur les activités biosynthétiques cellulaires telles que la prolifération cellulaire, l'oxyde d'azote endogène et la synthèse de collagène.

The Effect of Micro-Pulsatile Electrical and Ultrasound Stimulation on Cellular Biosynthetic Activities Such as Cellular Proliferation, Endogenous Nitrogen Oxide and Collagen Synthesis

Doris-Antoinette Mbeh, Insai Hadjab, Mihaela-Elena Ungur, L'Hocine Yahia, *Journal of Cosmetics, Dermatological Sciences and Applications*, Pub. Date: March 22, 2016, p 41-47. <http://dx.doi.org/10.4236/jcd-sa.2016.61006>

SOLUTION CLÉ EN MAIN

DÉMONSTRATION

Nous vous proposons de ressentir l'efficacité du système global RMD 2.0 dans notre centre de formation.

Prenez rendez-vous !

FORMATION

Pour l'achat d'un appareil RMD 2.0 nous vous offrons la journée de formation. (Théorie + Pratique)

SOUTIEN COMMERCIAL ET MARKETING

Nous vous fournissons tout le nécessaire pour démarrer sereinement avec votre appareil :

- Une proposition de formules de ventes avec protocoles de soins et tarifs,
- Un business plan avec amortissement et rentabilité,
- Les brochures pour vos clientes ainsi que des fiches de suivi clientes,
- Des visuels pour vos réseaux sociaux,
- Une PLV pour votre institut,
- Une journée de lancement «Découverte» à vos côtés pour recruter vos premières clientes.



Fabriqueur nord-américain depuis 1965.

Nous offrons des équipements de technologies avancées et du mobilier spécialisé pour les professionnels de l'esthétique et de la santé les plus réputés dans le monde.

Conçus et fabriqués au Canada, en conformité avec les normes internationales les plus strictes.

Spécifications techniques de l'appareil:

Largeur : 381 mm (15 po)
Hauteur : 229 mm (9 po)
Profondeur : 535 mm (21 po)
Poids : 4,5 kg (10 lb)
Puissance : 120/230 V – 60/50 Hz

*Silhouet-Tone Corporation Canada



SILHOUET-TONE CORPORATION

2185, Michelin
Laval, Québec H7L 5B8 Canada
Tel.: 450 687-9456, 1 866 340-9456
Fax: 450 687-5155
info@silhouettone.com

SILHOUET-TONE (U.S.A.)

1623 NW 84th Avenue
Miami, Florida 33126 U.S.A.
Tel.: 1 800 552-0418
stusa@silhouettone.com

SILHOUET-TONE (EUROPE) S.A.

Route de Suisse 9, CH-1295-Mies, Suisse
Tel.: +41 22 775-15 60
Fax: +41 22 775-15 67
ste@silhouet-tone.com

SILHOUET-TONE FRANCE Sarl

14, avenue du Dr Palluel
74160 St-Julien-en-Genevois, France
Tel.: +33 4 50 49 45 32
Fax: +41 22 775-15 67
stf@silhouet-tone.com

Informations & Démonstrations

sts@silhouet-tone.com
Tél: +41 (0)22 775 15 60

S.T MEDIC
Une division de Silhouet-Tone Corporation

